

SCHEDA TECNICA

RESPIRATORI FILTRANTI MONOUSO (EN 149:2001+A1:2009)

Istruzioni per l'uso:

YDE2 FFP2 NR pieghevole bianca

YDE2N FFP2 NR pieghevole nera

DPI 3ª categoria

Composizione FILTRO A 5 STRATI

PER POLVERI E AEROSOL A MEDIA TOSSICITÀ

IMBUSTATI SINGOLARMENTE

Confezione da 20 pz

Potere filtrante > 94%



IMPORTANTE: i facciali filtranti monouso sono classificati in base a tre categorie: FFP1 FFP2, FFP3. Prima di leggere le informazioni riportate di seguito, verificare la categoria a cui appartiene il facciale, indicata sulla confezione e sul facciale stesso. L'utente è tenuto ad assicurarsi che il respiratore fornisca un livello di protezione adeguato al tipo e alla concentrazione di sostanze contaminanti nell'area in cui deve essere utilizzato.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Prima di accedere all'area contaminata, indossare la mascherina e verificarne la tenuta.
- Indossare la mascherina per tutta la durata dell'esposizione alle sostanze contaminanti.
- Utilizzare la mascherina in modo conforme alle normative applicabili in materia di salute e sicurezza.
- Smaltire il facciale filtrante e sostituirlo con uno nuovo
 - se viene rimosso all'interno di un'area contaminata
 - se l'eccessivo intasamento causa difficoltà di respiro e/o malesseri
 - se danneggiato (per i respiratori con protezione dai vapori, se risulta percepibile l'odore dei vapori presenti)
 - se si è raggiunta la data di scadenza indicata su un respiratore non utilizzato (vedere la confezione)
- Abbandonare l'area contaminata in caso di insorgenza di irritazioni, vertigini o altri sintomi.
- Monouso. Non necessita di manutenzione. Non deve essere conservato né riutilizzato dopo il primo uso.
- Smaltire il facciale filtrante dopo l'uso (periodo massimo di utilizzo: un turno di lavoro).
- Conservare i facciali filtranti non utilizzati nella relativa confezione sigillata, in un ambiente asciutto e non contaminato e a una temperatura compresa fra -20° e +40° C.
- Umidità relativa massima di conservazione: < 80%

ORGANISMO NOTIFICATO:

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER (APPLUS), Campus UAB, Ronda de la Font del Carme s/n, E-08193 Bellaterra (Barcelona), Spain,
Nr. Organismo notificato: 0370

ISTRUZIONI PER INDOSSARE IL RESPIRATORE:

1. Afferrare il facciale filtrante con una mano. Tenere il facciale filtrante sotto il mento con il nasello rivolto verso l'esterno.
2. Posizionare le fascette dietro le orecchie.

SCHEDA TECNICA

3. Adattare il nasello alla forma del viso, modellandolo con la punta delle dita. Iniziare dalla parte superiore e premere verso l'interno su entrambi i lati.

CONTROLLO DELLA TENUTA (CORRETTO POSIZIONAMENTO SUL VISO)

1. Posizionare entrambe le mani sul facciale filtrante ed espirare vigorosamente. All'interno del facciale filtrante dovrebbe formarsi una pressione positiva. Se si rilevano fuoriuscite di aria intorno ai bordi, riposizionare il facciale filtrante stringendo il nasello e/o aumentando la tensione delle fascette. Ripetere la procedura fino a ottenere un posizionamento sul viso soddisfacente.
2. Prima di utilizzare il facciale filtrante, controllare che lo stesso non siano danneggiato. In caso contrario, non utilizzare la mascherina.
3. Verificare la data di scadenza sulla confezione, per verificare che il facciale filtrante sia ancora utilizzabile.

IMPORTANTE: se si utilizzano facciali filtranti con fascette non regolabili e si ritiene che queste siano troppo lente, è possibile stringerle formando un piccolo nodo.

LIMITAZIONI PER L'USO:

Non utilizzare i facciali filtranti né accedere o restare in un'area se:

- La concentrazione di ossigeno è inferiore al 17% (UK-19%)
- Le sostanze contaminanti o le relative concentrazioni non sono note o risultano immediatamente pericolose per la vita o la salute
- Le concentrazioni di particolati superano i livelli specificati dalle normative in materia di salute e sicurezza o il fattore di protezione x FPN, a seconda di quale sia minore. Fattori di protezione nominali: **4,5 per FFP1, 12 per FFP2 e 50 per FFP3**
- Sono presenti gas e/o vapori, tranne nel caso di respiratori con protezione dai vapori. In questo caso, le concentrazioni dei vapori non devono superare i FPN.
- I facciali filtranti con protezione dai vapori organici non devono essere utilizzati come protezione dai vapori acidi e viceversa.

AVVERTENZA:

- Non utilizzare in caso di incendio. I facciali filtranti non forniscono ossigeno.
- Non utilizzare in atmosfere con ossigeno insufficiente, ad esempio serbatoi o altre aree non adeguatamente ventilate (vedere "Limitazioni per l'uso").
- Non utilizzare in atmosfere esplosive.
- Destinato esclusivamente all'uso da parte di personale addestrato e qualificato. La presenza di barba sul viso può compromettere la tenuta del respiratore.
- Le mascherine contrassegnate da "NR" devono essere utilizzate solo per un singolo turno di lavoro.

PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO: industria farmaceutica, ceramica, verniciatura a polvere.

ULTERIORI ISTRUZIONI:

- L'utente si assume la responsabilità di verificare, prima dell'uso, che le mascherine siano idonee allo scopo previsto (inclusi gli eventuali fattori che potrebbero incidere sull'applicazione).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE:

Per il prodotto è disponibile la Dichiarazione di conformità UE in conformità al Regolamento PPE (UE) 2016/425 al seguente sito Web: www.socim.it

FABBRICANTE:

Zhejiang Yinda Biotechnology Co., Ltd.

No 1223, Hulian East Street, Changsonggang, Dongyang Economic Development Zone, 322104, Zhejiang Province, China

Prodotto importato da:

SOCIM SPA

VIA TOVINI, 72/74

25021 BAGNOLO MELLA (BS)

ITALIA

P.IVA 03204310175

TEL. 030/6829511